


Это руководство показывает Вам, как Вы можете экспортировать данные из OccluSense®-iPad-App в Вашу компьютерную систему. Что касается файлов, речь может идти или о PDF или о видео изображении окклюзии или о необработанных данных о пациенте с целью их сохранения.


## 1 СВЯЗЬ С СЕРВЕРОМ

Убедитесь, что Ваш iPad соединен с Вашей локальной сетью. Чтобы Ваш iPad соединить с компьютером или с сервером данных, следуйте, пожалуйста, пошаговой инструкции. После успешного соединения Ваш iPad автоматически подключается или к Вашему компьютеру или к файловому серверу.

Откройте App 'Файлы'




Наберите  сверху на боковой панели 'Просмотр', а затем 'Подключиться к серверу'.

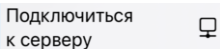

Дайте название локального хост или адрес подключения к сети и наберите 'Подключиться'.

Обычно хост сервер называется 'computer name.local' или введите адрес IP:

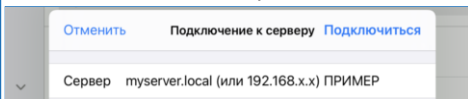


Относительно дальнейшей информации о работе Вашей сети спросите Вашего системного администратора.


**Подсказка:** После установки подключения к компьютеру или к файловому серверу в списке 'недавно используемый сервер' на экране появится 'связь с сервером'. Для установки соединения с незадолго до этого применяемым сервером кликните под его именем.


Выберите, как должно проходить подключение:

**Гость:** Вы можете зарегистрироваться как пользователь гость, если выделенный компьютер позволяет вход гостю.

**Зарегистрированный пользователь:** Если Вы выбрали 'зарегистрированный пользователь', введите имя пользователя и пароль. Если необходимо, спросите, пожалуйста, Вашего системного администратора.

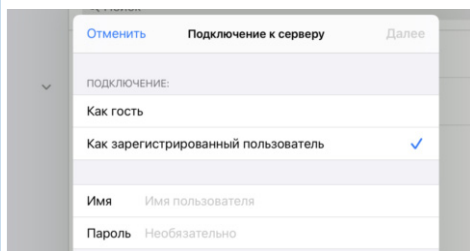


Наберите 'Далее' и выберите объем сервера или отдельный регистратор на боковой панели 'просмотр' (под названием 'Раздел' ).

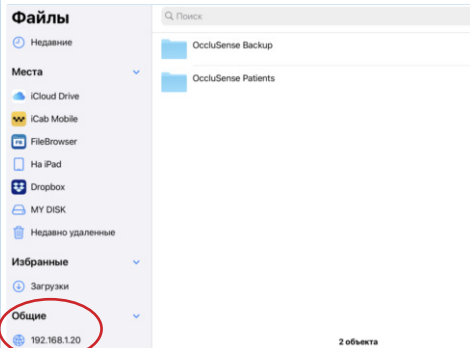


## 2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ УСТРОЙСТВУ

В качестве альтернативы Вы можете использовать внешнее устройство. Подключите внешнее устройство к iPad. Тогда на боковой панели появится 'Места'.

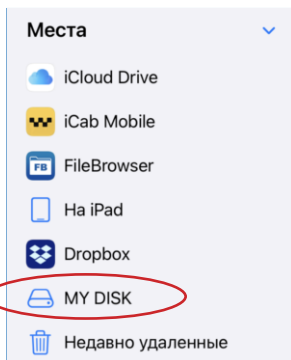



### 3 ЭКСПОРТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Откройте OccluSense®-iPad-App и откройте изображение, которое Вы бы хотели экспортировать как полный снимок.

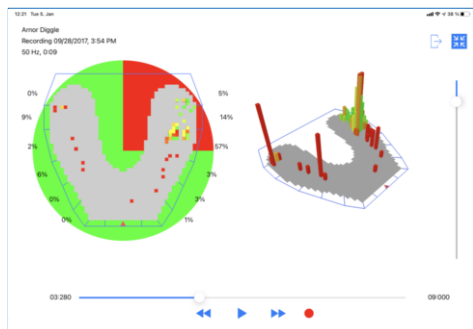


Наберите  и выберите 'PDF', затем нажмите на 'Показать PDF'.

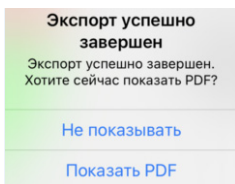


Если Вы хотите, можете записать на экране видео , используя при этом кнопку изображения.

Коснитесь в 'Поделиться'  на 'Поделиться'.

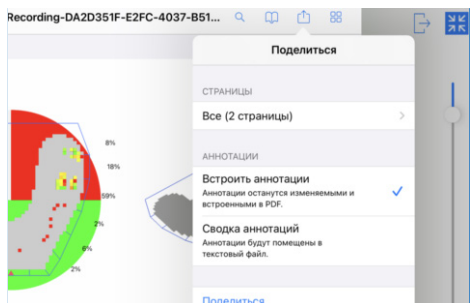


Выберите 'Сохранить в Файлы' и рабочий каталог Вашего файлового сервера (или подключенного внешнего устройства).

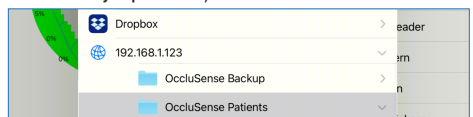


Теперь в этом месте на Вашем компьютере могут быть выбраны файлы.

### 4 ЭКСПОРТИРОВАНИЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ О ПАЦИЕНТЕ (СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ).


Откройте OccluSense®-iPad-App и коснитесь в главном меню на 'ПАЦИЕНТЫ'

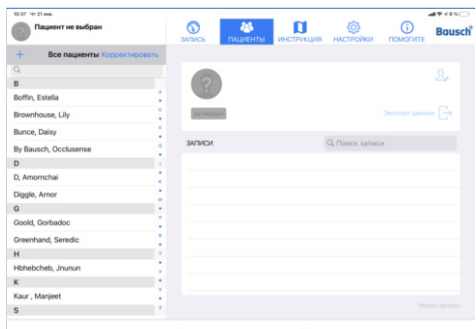

Наберите 'Корректировать' и выберите пациентов, которых Вы бы хотели загрузить.

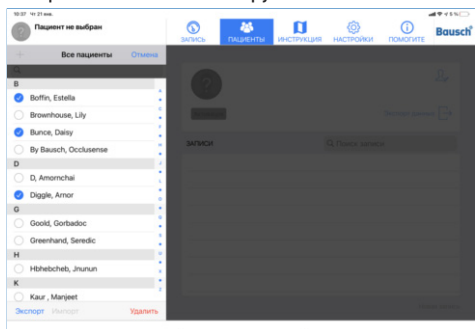

Теперь наберите 'Экспорт' и выберите 'Сохранить в Файлы'. Выберите 'рабочий каталог' на Вашем файловом сервере (или на подключенном внешнем устройстве).

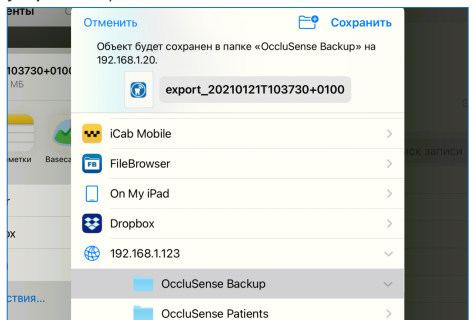

Эти экспортированные данные предусмотрены только в целях безопасности. Их можно импортировать только через OccluSense®-iPad-App.